

- 使用前には、必ずこの使用説明書をよく読み、表現や内容などでわからないことがあれば必ず眼科医に相談し、よく確認してからご使用ください。
- 使用説明書は大切に保管してください。
- この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- 本剤使用により少しでも異常を感じたら、直ちに眼科医に相談してください。
- コンタクトレンズの取扱いについてはレンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。
- コンタクトレンズを安全に装用するために、異常がなくても眼科医に指示された定期検査を必ず受けてください。

使用方法的の遵守に関する事項

使用方法及び使用上の注意等の内容を守り正しく使用しないと眼感染症等を生じ、重篤な場合には視力を失う可能性もあり得ますので、記載された事項は必ず守ってください。

特徴

1. レンズ装着時の異物感、乾燥感を軽減
うるおい成分（ヒプロメロース、ポリビニルアルコール）により、レンズ装用中の異物感や刺激、乾燥感を抑えます。
2. レンズの汚れを軽減
うるおい成分がレンズを覆うことで、涙液中のタンパクなどの汚れが付着するのを抑えることが期待できます。
3. 角膜細胞の新陳代謝を促進
2種類のアミノ酸成分（タウリン、アスパラギン酸カリウム）配合により、角膜細胞に栄養を与えます。
4. ハードレンズにもソフトレンズにも使用可能
すべてのハードコンタクトレンズ、ソフトコンタクトレンズ、使い捨てレンズに使用できます。

使用上の注意

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - ① 医師の治療を受けている人
 - ② 本人または家族がアレルギー体質の人
 - ③ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - ④ 目にはげしい痛みのある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この使用説明書を持って医師または薬剤師に相談してください。

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
目	充血・かゆみ・はれ

効 能 効 果


ハードコンタクトレンズまたはソフトコンタクトレンズの装着を容易にする。

用 法 ・ 用 量


本剤の1～3滴でコンタクトレンズの両面をぬらして装着してください。

<用法・用量に関する注意>

- ① 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ② 容器の先をコンタクトレンズ、指に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- ③ コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- ④ 用法・用量を厳守してください。

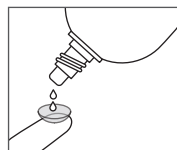

レンズに直接液を落とす

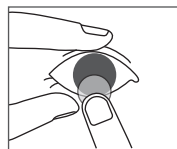

そのままレンズを装着する

成 分 (1mL中)

●有効成分：

ポリビニルアルコール(部分けん化物)… 10mg、ヒプロメロース… 6mg、
塩化ナトリウム… 2mg、タウリン… 10mg、L-アスパラギン酸カリウム… 1mg

●添加物：

ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、
D-ソルビトール、塩酸ポリヘキサニド

保 管 及 び 取 り 扱 い 上 の 注 意

- ① 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 他の人と共用しないでください。
- ⑤ 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はすみやかに使用してください。

しっとりフィットSの容器は、透明フィルムで密封包装されています。

フィルム破れ等の不審な点が見られた場合は、下記のお客様相談窓口へご連絡ください。

発売元：株式会社 **サンコン**

京都市下京区中堂寺庄ノ内町 46-1

<https://www.sun-con.com/>

製造販売元：株式会社 **エイコー**

名古屋市中村区竹橋町 10-17

お客様相談窓口

 **0120-02-5565**

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00

(土日祝日を除く)