

脂質・タンパク汚れもすっきり!

使用できるレンズ

すべてのハードコンタクトレンズ
オルソケラトロジーレンズ
(メニコンオルソK、プレスオーコレクト)

使用方法

- ①レンズに触れる前には必ず石鹸で手指を十分に洗浄してください。
- ②レンズに本剤を数滴つけ、指先でこすり洗いをします。
- ③洗浄したレンズをレンズクリップに入れ水道水ですすぎます。
- ④本剤をレンズ保存ケースに8分目ほど入れます。
- ⑤保存ケースにレンズを入れ、キャップをしっかりとめて4時間以上保存します。
- ⑥レンズクリップにレンズを入れたまま、水道水で充分すすいでから装用します。

使用上の注意

<ご使用に際しての注意>

- 絶対に点眼しないでください。誤って眼に入った場合は、すぐに水道水で洗い流し、直ちに眼科医に相談してください。
- 絶対に服用しないでください。誤って飲んでしまった場合は、多量の水を飲んでください。
- 本剤で処理したレンズは、必ず水道水でよくすすいだのちに装用してください。
- 本剤はソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 本剤による洗浄は毎日行ってください。
- 使用後の液は再使用できません。毎日交換してください。
- 製造番号により液の色が多少異なりますが、品質に影響ありません。
- 衣服などについた場合は、水道水で洗い流してください。

<使用中・使用後の注意>

- 万一、眼に異常を感じた場合は使用を中止し、直ちに眼科医に相談してください。

<保管および取扱上の注意>

- 小児の手の届かないところに直射日光をさけて室温で保管してください。
- 使用期限の過ぎた商品は使用しないでください。
- 長期保存する場合は1か月に1回の割合で本剤を入れ替えてください。

主成分:タンパク分解酵素、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤、HEC 誘導体、MPC ポリマー(リピジュア®)
容 量:120mL・360mL

リピジュアは日油株式会社の登録商標です

made in kyoto



サンコンレンズ

www.sun-con.com

本社 〒600-8814 京都市下京区中堂寺庄ノ内町46-1
お客様相談窓口 ☎ 0120-02-5565

仙台・東京・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・四国・福岡



酸素透過性
ハードコンタクトレンズ用
酵素洗浄保存液

ケアマイルド プラス⁺ Care Mild Plus⁺



すべてのハードコンタクトレンズに
ご使用いただけます

リピジュア®配合



made in kyoto



サンコンレンズ

www.sun-con.com

Care Mild Plus⁺

脂質やタンパク汚れも スッキリ落として レンズうるおう。

脂質・タンパク汚れを
しっかり落とす
プラスのみひつ




洗浄力アップ

(当社従来品との比較)

数種類の界面活性剤の配合により、タンパクだけでなく脂質もきれいに落とします。

人工汚れの洗浄テスト

※当社従来品を100%とした場合の比較

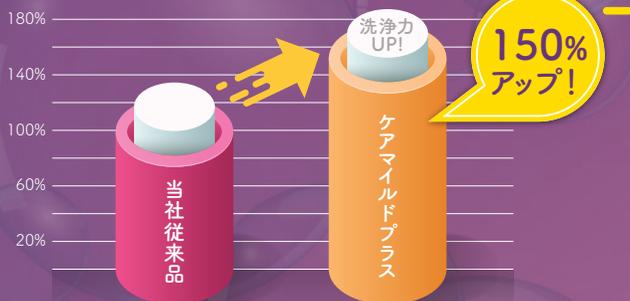

抗菌効果

雑菌の増殖を防ぐので、レンズも保存ケースもいつも清潔。抗菌力は使い切るまで持続します。

コンタクトレンズは 意外に汚れています


コンタクト
レンズの
汚れ

毎日使っているコンタクトレンズ、実はけっこう汚れています。

汚れの成分は主に涙に含まれている脂質やタンパク質など。

特に脂質は 化粧品などの油分と混じり合い、レンズ全体に油膜のように広がると、付いているのがわかりにくいという、とてもやっかいな汚れです。

汚れが残っていると視力不良や異物感など、目のトラブルの原因となりますので、毎日のレンズケアでしっかり落としましょう。

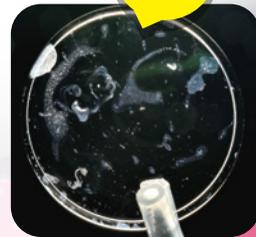

保湿&汚れの付着防止

リピジュア®をプラスし、優れた保湿力により、乾燥しにくい装用感と、レンズへの汚れの付着を防ぎます。

リピジュア®とは

涙にも含まれている成分「リン脂質」をモデルに開発された湿潤性の高い素材です。化粧品保湿剤として使用の場合、その**保湿力はヒアルロン酸の2倍**と言われており、医薬品や化粧品など、幅広い分野で使用されています。



リピジュアは日油株式会社の登録商標です

- すべてのハードコンタクトレンズ
- オルソケラトロジーレンズ (メニコンオルソK、プレスオーコレクト) に使用できます。

