

Super CARE MILD

酸素透過性ハードコンタクトレンズ・ハードコンタクトレンズ用
酵素洗浄保存液 スーパーケアマイルドは、

- これ1本で **1. 洗浄、**
2. タンパク除去、
3. 保存ができます。

しかも“つけおき”タイプの
“かんたん”ケアシステムです。



スーパーケアマイルド
徳用サイズ360ml ¥3,500



スーパーケアマイルド
120ml ¥1,500



サンコンタクトレンズ

スーパーケアマイルド

スーパーケアマイルドは酵素透過性ハードコンタクトレンズをはじめ、ハードコンタクトレンズのわずらわしいケアを簡単にします。
必ず使用方法・使用上の注意をよく読んでご使用ください。

特 長

- ①スーパーケアマイルド1本でレンズの洗浄、タンパク除去、保存が同時にできます。
- ②スーパーケアマイルドに一晩浸けておくだけで、こすり洗いは不要です。
- ③タンパクや脂質汚れの洗浄に優れています。
- ④泡立ちを抑えすぎやすくしました。
- ⑤使い終わるまで洗浄力は低下しません。

用 途

酵素透過性ハードコンタクトレンズをはじめハードコンタクトレンズの洗浄、タンパク除去、保存。

使用 方法

- ①レンズ保存ケースに本品をレンズ全体が浸かるように入れて下さい。
- ②目からはずしたレンズを左右それぞれのレンズホルダーに装着して、レンズ保存ケースに入れキャップをしっかりとめて下さい。
- ③レンズ全体が、充分浸かっていることを確かめてから、一晩（4時間以上）保存して下さい。
- ④レンズを装着する時は、保存ケースからレンズを取り出し、水道水でレンズのヌルヌルした感じがなくなるまでよくすすいで下さい。

汚れのひどい場合

保存ケースからレンズを取り出し、すぐにすすがず指で軽くすりあわせるようにこすった後、水道水でよくすすいで下さい。

- レンズ保存ケース内の液は毎日捨て、水道水できれいに洗った後、新しい液と取り替えて下さい。
- 1ヶ月以上長期に保存される場合は、1ヶ月に1回の割合で本品を入れ替えて下さい。
- 一時的にレンズを保存する場合も、保存液として本品をお使い下さい。
- 一旦レンズをはずし、着用し直す場合も洗浄液として本品で軽くこすり洗った後、水道水でよくすすいでから装着して下さい。

カスタムメイドの

株式会社 **サン コンタクトレンズ**

本 社 / 〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上ル475 (サンコンビル)
TEL (075) 221-6861 (代表)

営業所

東 京 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目3番2号(アックス神田ビル4F)
TEL (03) 3865-3061 (代表)

京 都 / 〒600-8146 京都市下京区七条通東洞院東入ル (第一キョートビル7F)
TEL (075) 351-1241 (代表)

大 阪 / 〒530-0057 大阪市北区曾根崎2丁目15番29号 (東海ビル8F)
TEL (06) 6315-8861 (代表)

神 戸 / 〒650-0015 神戸市中央区多聞通2丁目4番4号(ブックローン神戸ビル7F)
TEL (078) 371-6521 (代表)

広 島 / 〒732-0824 広島市南区的場町1丁目3番 (広島の場ビル8F)
TEL (082) 261-3901 (代表)

福 岡 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号(日本団体生命福岡ビル10F)
TEL (092) 481-2761 (代表)