




レンズのくもりや異物感  
それはレンズの汚れが原因です  
これからのレンズケアは  
マルチサポートでスッキリ洗浄


**酵素の力で洗浄力がグーンとパワーアップ!**  
今ご使用のケア用品に毎日1滴加えるだけでいつもレンズはピッカピカ

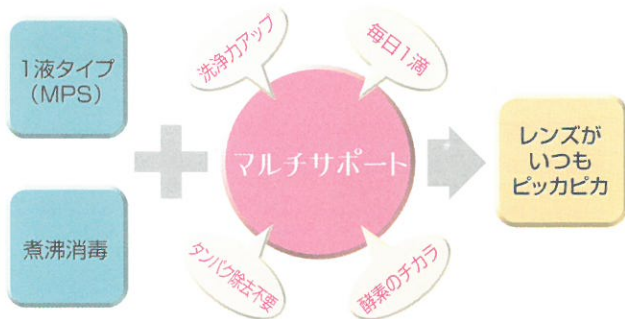

**洗浄効果**

**1液タイプ (MPS) 単独使用との比較**

1液タイプ (MPS) 単独使用の場合と「マルチサポート」を加えた場合で洗浄力の比較を行いました。(当社試験方法)

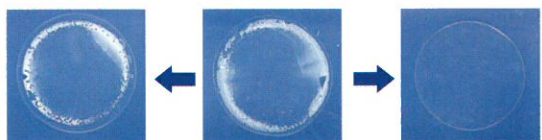

● 1液タイプ (MPS) 単独使用      ● 洗浄前      ● 1液タイプ (MPS) + マルチサポート

その結果、「マルチサポート」を加えた場合、洗浄力が大幅に向上しました。



**製品仕様**

製品名	マルチサポート (ソフトコンタクトレンズ用酵素洗浄剤)	
用途	ソフトコンタクトレンズの洗浄	
使用方法	1液タイプ (MPS) の場合	1液タイプ (MPS) に加えて4時間以上放置して洗浄
	煮沸消毒の場合	ソフトレンズ保存液に加えて煮沸消毒と同時に洗浄
使用可能なレンズ	I~IVグループに含まれるソフトコンタクトレンズ	
使用可能なMPS	コンプリート (アラガン) / レニュー (ボシュロム) / オプティ・フリー (アルコン) / アイネス (メニコン) / マイティアCLソフトレンズケア (千寿製薬) / フォーカスケア1 (チバビジョン) / ビューティー (オフテクス)	
主成分	タンパク分解酵素	
容量	5ml (毎日左右のレンズに1滴ずつ使用して約1.5ヵ月分)	
価格	¥1,400	
使用期限	製造後2年 (容器本体、外箱にロットナンバーと共に記載)	
保存条件	蓋をしっかりとしめ、直射日光を避け、室温で保存	

※MPS (マルチパーパスソリューション) は医薬部外品のソフトコンタクトレンズ用消毒液です。

カスタマイズの  
株式会社 **サン コンタクトレンズ**

本 社 / 〒604-0983 京都市中京区麩屋町通奥川上ル475  
TEL. (075) 221-6861 (代表) FAX. (075) 221-7810  
<http://www.sun-con.com>

- 営業所
- 東 京 / TEL. (03) 3865-3061 FAX. (03) 3865-3062
  - 京 都 / TEL. (075) 351-1241 FAX. (075) 351-1331
  - 大 阪 / TEL. (06) 6315-8861 FAX. (06) 6315-8485
  - 神 戸 / TEL. (078) 371-6521 FAX. (078) 371-6960
  - 広 島 / TEL. (082) 261-3901 FAX. (082) 261-3899
  - 福 岡 / TEL. (092) 481-2761 FAX. (092) 481-2762

ソフトコンタクトレンズ用 酵素洗浄剤  
**Multisupport**  
マルチサポート

新発売

MPS (コンプリート、レニュー、オプティ・フリー) や  
煮沸消毒にご使用できます



酵素の力で洗浄力がパワーアップ!  
マルチサポートを  
今ご使用のケア用品に  
1滴加えるだけ

 **サン コンタクトレンズ**



## 使用可能なレンズ

I~IVグループに含まれるソフトコンタクトレンズ(MPS使用可能なレンズ、煮沸消毒可能なレンズ)に使用できます。  
煮沸消毒できないソフトコンタクトレンズがありますので、レンズの取扱説明書を必ずお読み下さい。

## 使用可能な1液タイプ(MPS)

- コンプリート(アラガン)
- レニュー(ボシュロム)
- オプティ・フリー(アルコン)
- アイネス(メニコン)
- マイティアCLソフトレンズケア(千寿製薬)
- フォーカスケア1(チバビジョン)
- ビューティー(オフテクス)

## 使用上の注意

ご使用の際は、使用方法に従って正しくお取り扱い下さい。誤った取り扱いをすると、十分な洗浄効果が得られないばかりでなく、レンズの異常や眼疾患の原因となりますのでご注意ください。

### <使用に際しての注意>

- 絶対に点眼・服用しないで下さい。誤って眼に入った場合は、すぐに水道水でよく洗い流し、直ちに眼科医に相談して下さい。また、誤って飲んでしまった場合は、多量の水を飲んで下さい。
- 本剤は過酸化水素を用いた化学消毒液には使用できません。
- 本剤は必ず1滴で使用して下さい。2滴以上の濃厚液で使用すると、レンズに異常をきたすことがあります。
- 使用後の液は再使用できません。使用後の液は必ず捨て、レンズケースは水道水でよく洗い、自然乾燥した後に新しい液を入れて下さい。
- MPSは煮沸消毒に使用できません。
- 本剤で処理したレンズはそのまま眼に入れしないで下さい。
- 必ず、MPSまたはソフトレンズ保存液でよくすすいだ後に、装着して下さい。鉄分付着の原因となりますので、水道水は使用しないで下さい。
- 他の酵素洗浄剤と同時に使用しないで下さい。
- 本剤による洗浄は毎日行ってください。特に汚れのひどい場合は、ソフトレンズ用クリーナーでコスリ洗いをしていただくとう効果的です。
- 本剤が衣類に付いた場合、その箇所を水でよくすすぎ、なるべく早く洗濯やクリーニングをして下さい。

### <使用中、使用後の注意>

- ・万一、眼に異常を感じた場合は、使用を中止し、直ちに眼科医に相談して下さい。

### <保管及び取り扱い上の注意>

- ・小児の手の届かないところに保管して下さい。
- ・使用後は容器のキャップをしっかりとめ、直射日光を避け、室温で保管して下さい。
- ・使用期限の過ぎた商品は使用しないで下さい。
- ・容器の開封後は、なるべく早く使用して下さい。

## 使用方法

### MPSの場合

コンプリート、レニュー、オプティ・フリーなど

- ① レンズを取り扱う前に手を石鹸でよく洗って下さい。
- ② レンズケースの右側(R)、左側(L)に「マルチサポート」の底部を押して1滴ずつ入れます。
- ③ レンズケースにMPSを8~9分目まで入れます。
- ④ はずしたレンズを手のひらにのせ、MPSでコスリ洗いをした後、MPSで十分にすすぎます。
- ⑤ レンズをレンズケースに入れ、完全に液中にはずめてからキャップをしめ軽く振ります。
- ⑥ そのまま4時間以上放置します。この間にレンズの消毒と洗浄が行われます。
- ⑦ レンズをレンズケースから取り出し、MPSでよくすすいだ後、右左を確認してから装着します。
- ⑧ 使用後の液はすべて捨て、レンズケースは水道水でよく洗い、自然乾燥させ清潔に保ちます。
- ⑨ すぐにレンズを装着しない場合はレンズケースに新しいMPSを入れ、レンズを保存して下さい。



### 煮沸消毒の場合

- ① レンズを取り扱う前に手を石鹸でよく洗って下さい。
- ② レンズケースの右側(R)、左側(L)に「マルチサポート」の底部を押して1滴ずつ入れます。
- ③ レンズケースにソフトレンズ保存液を8~9分目まで入れます。
- ④ はずしたレンズを手のひらにのせ、ソフトレンズ保存液でコスリ洗いをした後、ソフトレンズ保存液で十分にすすぎます。
- ⑤ レンズをレンズケースに入れ、完全に液中にはずめてからキャップをしめ軽く振ります。
- ⑥ レンズケースを煮沸消毒器にセットし、レンズの消毒と洗浄をします。
- ⑦ レンズをレンズケースから取り出し、ソフトレンズ保存液でよくすすいだ後、右左を確認してから装着します。
- ⑧ 使用後の液はすべて捨て、レンズケースは水道水でよく洗い、自然乾燥させ、清潔に保ちます。
- ⑨ すぐにレンズを装着しない場合は、レンズケースに新しいソフトレンズ保存液を入れ、レンズを煮沸消毒後、そのまま保存して下さい。



## Multisupport マルチサポート

### POINT 1

コンプリート(アラガン)  
レニュー(ボシュロム)  
オプティ・フリー(アルコン)

などの1液タイプ(MPS\*)や  
煮沸消毒に使用できます

コンセプトF(アラガン)、エーオーセプト(チバビジョン)  
などの過酸化水素を用いた化学消毒液には使用できません。



### いつもレンズをきれいな 状態に保ちます

従来のケア用品に毎日1滴加えるだけで、  
洗浄力が大幅アップ

酵素の洗浄力をパワーアップしたため、汚れ落ちがよくなりました。

### POINT 2



### POINT 3

タンパク除去が不要になります

マルチサポートを加えるだけで、ヨゴレの  
蓄積を防ぎ、週1回のタンパク除去が不要  
になります。

※MPS(マルチパーパスソリューション)は医薬部外品のソフトコンタクトレンズ用消毒液です。

