

酸素透過性ハードコンタクトレンズ・
ハードコンタクトレンズ用
酵素洗浄保存液

Super CARE MILD II

酵素洗浄保存液 スーパーケアマイルドIIは、
これ1本で **1. 洗浄**

2. タンパク除去

3. 保存 ができます。

しかも “つけおき” タイプの
“かんたん” ケアシステムです。



スーパーケアマイルドII
徳用サイズ360ml ¥3,675

スーパーケアマイルドII
120ml ¥1,575

*表示価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）です。



サンコンタクトレンズ

スーパーケアマイルドⅡ

スーパーケアマイルドⅡは酸素透過性ハードコンタクトレンズをはじめ、ハードコンタクトレンズのケアを簡単にします。
必ず使用方法、使用上の注意をよく読んでご使用ください。

特 長

- ①スーパーケアマイルドⅡ1本でレンズの洗浄、タンパク除去、保存ができます。
- ②スーパーケアマイルドⅡに一晩浸けておくだけで、こすり洗いは不要です。
- ③タンパクや脂質汚れの洗浄に優れています。
- ④泡立ちを抑え、すすぎやすくしました。
- ⑤使い終わるまで洗浄力は低下しません。

用 途

酸素透過性ハードコンタクトレンズをはじめハードコンタクトレンズの洗浄、タンパク除去、保存。

使用 方法

- ①本剤をレンズ保存ケースに8分目ほど入れます。
- ②保存ケースにレンズを入れキャップをしっかりとめて4時間以上保存します。
- ③水道水でレンズのヌルヌルした感じがなくなるまでよくすすいでから装着します。

本剤は“つけおきタイプ”の酵素洗浄保存液ですが、汚れのひどいときは“こすり洗い”での洗浄方法をおすすめします。

●汚れが気になる場合

レンズの凹面を上にして手のひらにのせます。
本剤を数滴つけ指先で、“こすり洗い”をし、すぐにすすぎ指で軽くすりあわせるようにし、その後水道水でよくすすぎます。

●汚れがひどい場合

レンズの凹面が上側になるように手のひらにのせます。
研磨剤入り強力洗浄液サンクリーン&ウエットを3~4滴落とし、指先や手のひらを使っていねいにレンズの両面をこすり洗います。
レンズ表面に液が残らないように、水道水で十分にすすぎます。

(レンズの破損、紛失にご注意ください。)

- 使用後の液は再使用できません。毎日交換してください。
- 長期間保存する場合は、1ヶ月に1回の割合で本品を入れ替えてください。
- 本剤はソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 使用期限の過ぎた商品は、使用しないでください。

株式会社 サンコンタクト

本 社 〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上ル475
TEL (075) 221-6861 (代表) FAX (075) 221-7810

お 客 様 相 談 窓 口 ☎ 0120-02-5565

受付：9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ <http://www.sun-con.com>

携 帯 用 ホ ー ム ペ ー ジ <http://k.excite.co.jp/hp/u/ihpsuncon/>

営 業 所

東 京 Tel. (03) 3865-3061 京 都 Tel. (075) 351-1241

大 阪 Tel. (06) 6315-8861 神 戸 Tel. (078) 371-6521

広 島 Tel. (082) 261-3901 福 岡 Tel. (092) 481-2761