

酸素透過性ハードコンタクトレンズ・  
ハードコンタクトレンズ用酵素洗浄保存液

・ 使用方法 ・

- ①本剤をレンズ保存ケースに8分目ほど入れます。
- ②保存ケースにレンズを入れ、キャップをしっかりとめて4時間以上保存します。
- ③レンズクリップにレンズを入れたまま、水道水で充分すすいでから装着します。

本剤は“つけおきタイプ”の酵素洗浄保存液ですが、汚れのひどい場合は“こすり洗い”による洗浄方法をおすすめします。

・ 使用上の注意 ・

- 使用方法をよく読んで、内容をよく理解して、正しく使用してください。
- 絶対に点眼、服用しないでください。
- 本剤で処理したレンズは、必ず水道水で十分にすすいだ後に装着してください。
- 本剤はソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 本剤による洗浄は毎日行ってください。
- 使用後の液は再使用できません。毎日交換してください。
- 万一、眼に異常を感じた場合は使用を中止し、直ちに眼科医に相談してください。
- 小児の手の届かないところに、直射日光をさけて室温で保管してください。
- 使用期限の過ぎた商品は使用しないでください。
- 長期間保存する場合は、1か月に1回の割合で本剤を入れ替えてください。



本社：〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上ル475  
TEL(075)221-6861

仙台：TEL(022)236-0181 東京：TEL(03)3865-3061 名古屋：TEL(052)962-5851  
京都：TEL(075)351-1241 大阪：TEL(06)6315-8861 神戸：TEL(078)371-6521  
広島：TEL(082)261-3901 福岡：TEL(092)481-2761 宮崎：TEL(0985)23-9281

お客様相談窓口 ☎0120-02-5565  
受付 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)  
ホームページ <http://www.sun-con.com/>

SA.09.9.10.000④



しっとり成分配合



これ1本で洗浄・保存・タンパク除去ができ、  
しっとり効果をプラス。装着感が向上します。



## これは便利! 「すっきり・はっきり・しっとり感」を、これ1本で解決!!

### 特 長

- ① しっとり成分配合で、レンズの装用感が向上します。  
しっとり成分を配合、水濡れ性が良くなります。
- ② 洗浄・保存・タンパク除去がこれ1本で可能です。  
タンパク分解酵素を配合、つけおきだけのケアが可能です。  
※汚れのひどい場合には「こすり洗い」による洗浄方法をおすすめします。
- ③ 優れた洗浄力が、使い切るまで持続します。  
タンパク分解酵素の安定性が高いため、使い切るまで洗浄効果が持続します。

### 用 途

酸素透過性ハードコンタクトレンズ及びハードコンタクトレンズの洗浄・保存・タンパク除去  
※ソフトコンタクトレンズには使用できません。

### 主 成 分

タンパク分解酵素、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤、HEC誘導体(しっとり成分)

### 容 量 ・ 価 格

120mL: ¥1,575


360mL: ¥3,675

(税込みメーカー希望小売価格)



### しっとり効果

しっとりケアマイルドを使用する前と後で、水濡れ性(レンズ表面への水のなじみやすさ)を比較してみました。

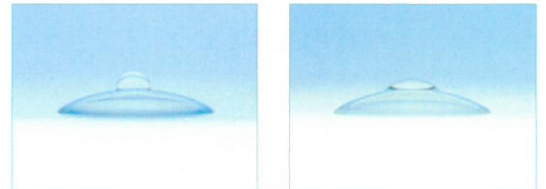

〈使用前〉

〈使用后〉

使用後は水滴がレンズ表面に平らに広がり「しっとり」しているのがわかります。

### 洗 浄 効 果

しっとりケアマイルドと従来洗浄保存液(酵素なしタイプ)との洗浄効果を比較してみました。

レンズに付いた汚れを赤く染めています。(赤いほど、汚れが残っていることがわかります)



従来の洗浄保存液(酵素なしタイプ)に4時間保存後

洗浄前の状態

しっとりケアマイルド(酵素配合タイプ)に4時間保存後