

指定医薬部外品

コンタクトレンズ装着薬

しっとり  
フィット

製品名

しっとりフィット 15mL

効能効果

ハードコンタクトレンズまたはソフトコンタクトレンズの装着を容易にします。

用法・用量

本剤の1～3滴でコンタクトレンズの両面をぬらして装着してください。

成分

〈有効成分〉塩化ナトリウム、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒプロメロース、アミノエチルスルホン酸

〈添加物〉エデト酸ナトリウム水和物、リン酸二水素カリウム、無水リン酸一水素ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物液

使用上の注意

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - ①医師の治療を受けている人
  - ②本人又は家族がアレルギー体質の人
  - ③薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - ④目にはげしい痛みのある人
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 使用に際しては、添付の使用説明書をよく読んでください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

made in kyoto

SUN **サンコンコン**

本社 〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上る475  
TEL.075-221-6861 <http://www.sun-con.com/>

仙 台：TEL.022-236-0181 東 京：TEL.03-3865-3061 名 古 屋：TEL.052-962-5851  
京 都：TEL.075-351-1241 大 阪：TEL.06-6315-8861 神 戸：TEL.078-371-6521  
広 島：TEL.082-261-3901 福 岡：TEL.092-481-2761 宮 崎：TEL.0985-23-9281

お客様相談窓口 ☎ 0120-02-5565  
受付 9:00～17:00(土・日・祝日は除く)

TS.14.12.5000①

いつも快適  
やさしいベール

しっとり  
フィット



【ハード・ソフト用】15mL  
すべてのコンタクトレンズに使えます

SUN **サンコンコン**  
[www.sun-con.com/](http://www.sun-con.com/)

# しっとり フィット

## 「しっとりベール」が 涙液の蒸発やレンズへの 汚れの付着を軽減するので、 コンタクトレンズを快適に 装用することができます。

このような方におすすめします


### ハードレンズの場合

- 装着時に異物感がある。
- くもりやすく、乾燥感がある。
- 汚れがつきやすい。
- 装用感を改善したい。

### ソフトレンズの場合

- 乾燥しやすく、装用感が悪い。
- 涙液が少なく、乾燥感がある。
- 目薬を頻繁に使用している。
- はりつき感がある。
- 圧迫感がある。
- 汚れがつきやすい。

しっとり感・装用感  
汚れの軽減

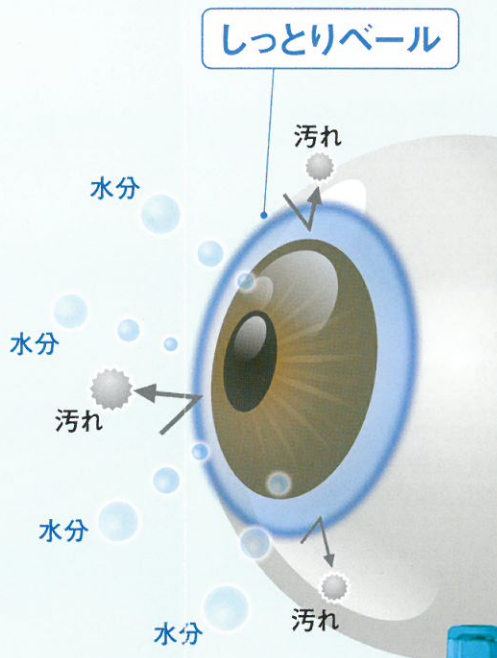

レンズ装着時の  
異物感・乾燥感を  
軽減

しっとり成分<sup>1)</sup>により、レンズ  
装着中の異物感や刺激、  
乾燥感をおさえます。

1) ヒプロメロース、ポリビニルアルコール

レンズの汚れを  
軽減

涙液中のタンパクなどの  
汚れがレンズに付着するのを  
おさえる成分が配合されて  
います。

タウリン配合

タウリン<sup>2)</sup>配合により、角膜  
細胞に栄養を与えます。


2) アミノエチルスルホン酸

すべてのレンズに  
使用可能


すべてのハードレンズ、  
ソフトレンズ、使い捨てレンズ  
に使用できます。

### しっとりフィット使用後アンケート

ハードレンズ、ソフトレンズユーザーに「しっとりフィット」の使用後の感想を聞いてみました。

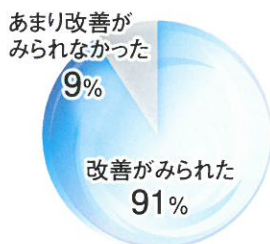

Q 装用感に変化は  
ありましたか？

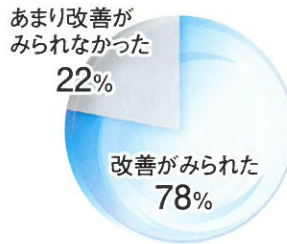

Q 乾燥感に変化は  
ありましたか？

しっとりフィットの使用により約90%の方が装用感改善、約80%の方が乾燥感改善と答えられました。

※当社資料



使い方

