

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用酵素洗浄保存液

ケアマイルドモイスチャー

Care Mild Moisture

使用できるレンズ

- すべてのハードコンタクトレンズ

使用方法

- レンズに触れる前には必ず石けんで手指を十分に洗浄してください。
 - ① 本剤をレンズ保存ケースに8分目ほど入れます。
 - ② 保存ケースにレンズを入れ、キャップをしっかりとめて4時間以上保存します。
 - ③ レンズクリップにレンズを入れたまま、水道水で充分すすいでから装着します。

※ 本剤は“つけおきタイプ”の酵素洗浄保存液ですが、“こすり洗い”での洗浄方法をおすすめします。

※ 洗浄方法 (こすり洗い)

レンズの凹面を上にして手のひらにのせます。本剤を数滴つけ指先で“こすり洗い”をし、その後水道水でよくすすぎます。
(レンズの破損、紛失にご注意ください)

使用上の注意

<ご使用に際しての注意>

- 絶対に点眼しないでください。誤って眼に入った場合は、すぐに水道水で洗い流し、直ちに眼科医に相談してください。
- 絶対に服用しないでください。誤って飲んでしまった場合は、多量の水を飲んでください。
- 本剤で処理したレンズは、必ず水道水でよくすすいだのちに装着してください。
- 本剤はソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 本剤による洗浄は毎日行ってください。
- 使用後の液は再使用できません。毎日交換してください。
- 製造番号により液の色が多少異なりますが、品質に影響ありません。
- 衣服などについた場合は、水道水で洗い流してください。

<使用中・使用後の注意>

- 万一、眼に異常を感じた場合は使用を中止し、直ちに眼科医に相談してください。

<保管および取扱上の注意>

- 小児の手の届かないところに直射日光をさけて室温で保管してください。
- 使用期限の過ぎた商品は使用しないでください。
- 長期保存する場合は、1ヵ月に1回の割合で本剤を入れ替えてください。

主成分：タンパク分解酵素、陰イオン界面活性剤、
非イオン界面活性剤、両性界面活性剤、
HEC誘導体
容 量：120mL・360mL



本社 〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上る475
TEL.075-221-6861 <http://www.sun-con.com/>

仙 台：TEL.022-236-0181 東 京：TEL.03-3865-3061 名 古 屋：TEL.052-962-5851
京 都：TEL.075-351-1241 大 阪：TEL.06-6315-8861 神 戸：TEL.078-371-6521
広 島：TEL.082-261-3901 福 岡：TEL.092-481-2761 宮 崎：TEL.0985-23-9281

お客様相談窓口

☎ 0120-02-5565

受付 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

TS.15.5000③



サンバーフェクトケア

酸素透過性
ハードコンタクトレンズ用
酵素洗浄保存液

ケアマイルド モイスチャー

Care Mild Moisture



レンズケアはこれ1本!



サンコン www.sun-con.com/

レンズケアはこれ1本!
ケアマイルドモイスチャー

すぐれた洗浄力でレンズ汚れをすっきりクリアにし、
 しっとりベールがレンズをやさしく包みます。
 さらに抗菌効果をプラスで安心。

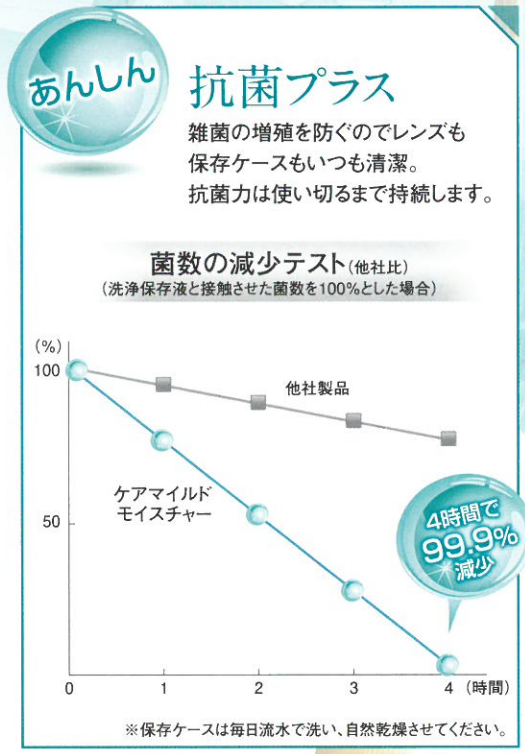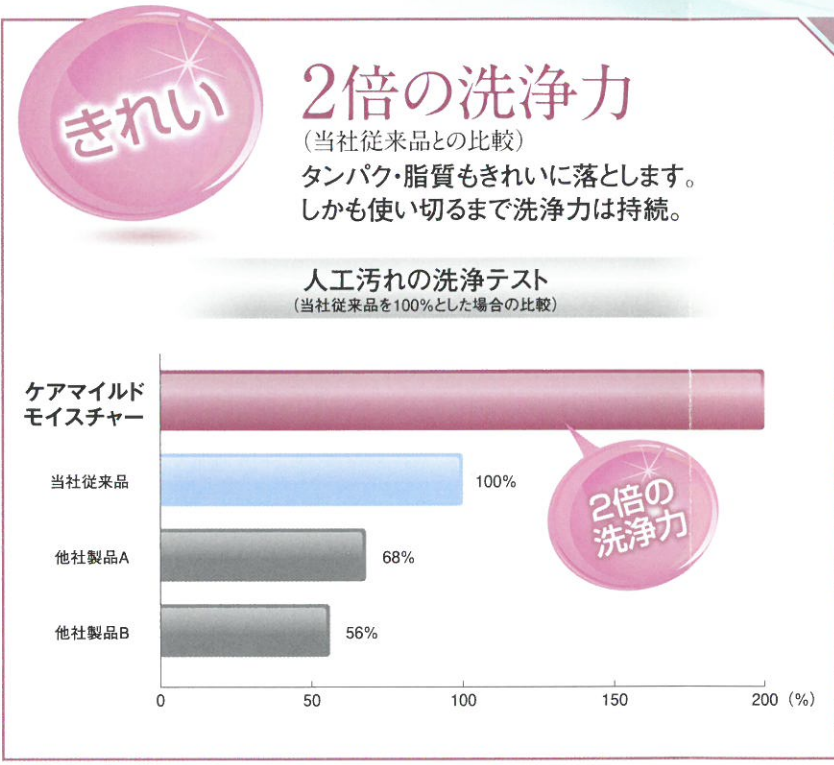

しっとり効果30%アップ
 (当社従来品との比較:親水性テストの面積比)
 しっとり効果で装用を快適に。
 さらに、しっとりベールで汚れをガード。



使いやすいボトルデザイン
 女性の小さな手にもやさしいフィットボトルと、
 開けやすいワンタッチキャップを採用しました。

